


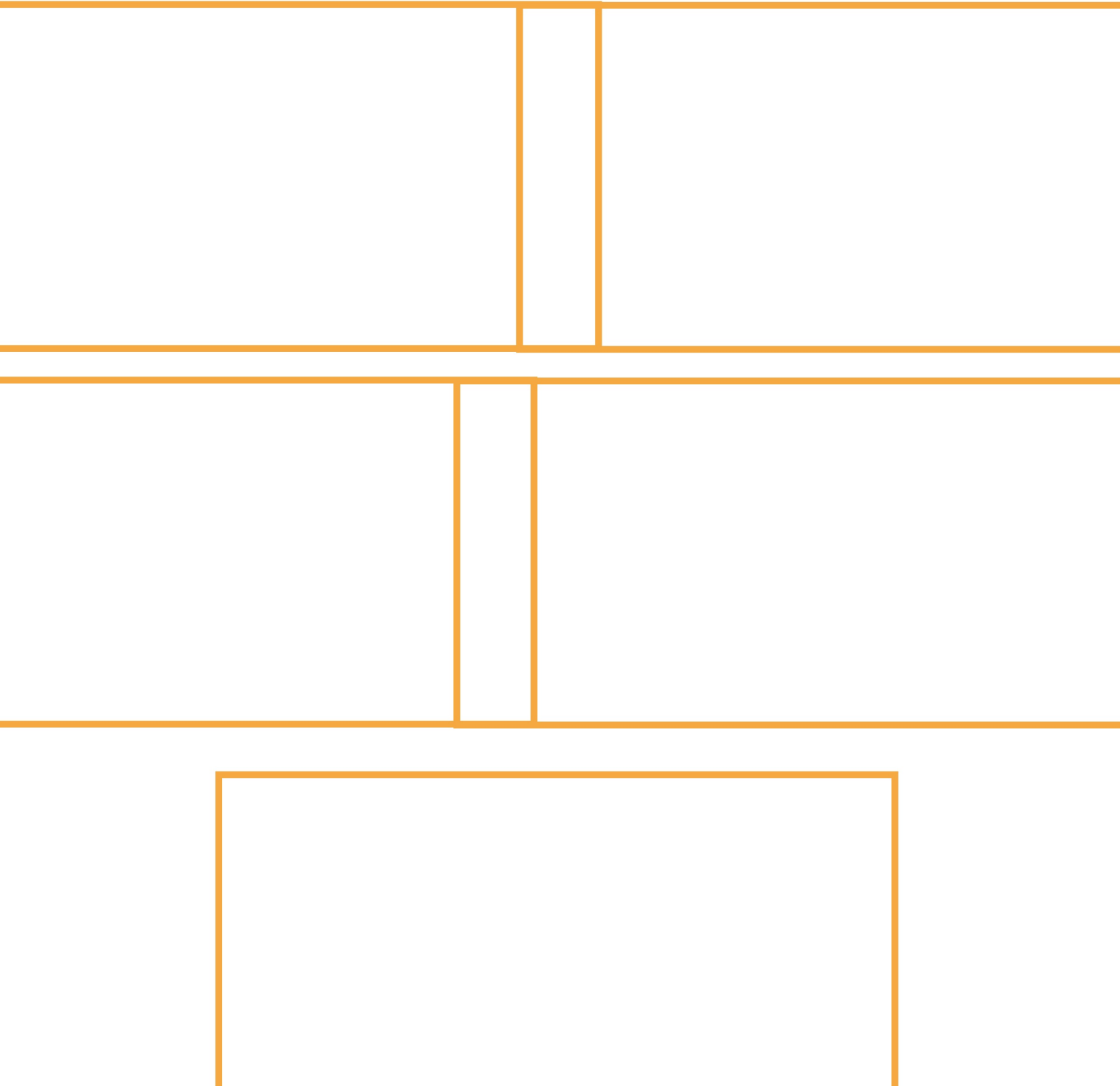

## ÉTAPES DU TRANSFERT

- 1 - Accrocher les attaches de la sangle sur le bras articulé
- 2 - À l'aide de l'interrupteur (ou télécommande) lever la personne jusqu'au niveau de l'assise du siège du véhicule
- 3 - Diriger la personne sur l'assise du siège du véhicule en la poussant délicatement
- 4 - Une fois la personne assise confortablement, mettre la ceinture de sécurité
- 5 - Retirer les attaches accrochées au bras articulé puis décrocher le bras de son support pour le ranger dans le coffre





## SOULÈVE-PERSONNE – POUR VÉHICULE TYPE VAN/FOURGON

Le souleve-personne pour les véhicules de type VAN / FOURGON offre la solution au problème de transfert d'une personne à mobilité réduite de son fauteuil roulant au véhicule. Le système se compose :

- d'un bras articulé
- d'une colonne fixée au plancher
- d'une sangle spécifique

L'utilisateur est soulevé grâce au système électrique fixé sur une colonne.

La rotation du bras se fait manuellement tandis que sa montée et descente s'actionnent à partir d'un interrupteur (télécommande sans fils en option) .

Conçu pour minimiser les efforts d'une tierce personne aidant au transfert, le mouvement s'effectue sans heurt et tout en souplesse. Aucun risque de chute possible, garantissant le bien-être et le confort de la personne à mobilité réduite. Le bras du souleve-personne se démonte pour être rangé dans le coffre du véhicule après chaque utilisation.

## CARACTÉRISTIQUES & ATOUTS

- N'entraîne aucune modification du véhicule
- Permet le maintien du siège d'origine
- Matériel démontable et récupérable en cas de changement de véhicule
- Télécommande sans fils en option
- Capacité de levage : 110 kg

